

# Anleitung Instillation ialuril® Prefill

MIT  
KATHETER

Bei der Anwendung über einen Katheter sollten folgende Schritte sorgfältig befolgt werden:

- 1 — Nachdem der/die Patient(-in) spontan Harn gelassen hat, ist die Harnblase mit einem eigens dafür vorgesehenen sterilen Katheter über die äußere Harnröhrenöffnung (meatus urethrae externus) von allen Urinrückständen zu befreien. Den vollständigen Austritt des Urins aus der Harnblase abwarten (es wird die Verwendung eines Katheters 8 Ch empfohlen).
- 2 — Die mitgelieferte Kolbenstange auf die Fertigspritze stecken und festschrauben, bis sie perfekt sitzt.



- 3 — Die Verschlusskappe der Spritze entfernen.

## Katheter ohne Luer-Lock

- 4a — Den Luer-Lock-Adapter auf das obere Ende der Fertigspritze setzen.



- 4b — Verschlusskappe entfernen und mit dem zuvor in der Harnblase positionierten sterilen Katheter verbinden.



## Katheter mit Luer-Lock

- 4 — Den zuvor in der Harnblase positionierten sterilen Katheter auf die Spritze montieren.



- 5 — Den gesamten Inhalt der Spritze über den Katheter langsam in die Harnblase instillieren.

- 6 — Sobald das Produkt in die Harnblase instilliert worden ist, den Katheter mit der Spritze vorsichtig entfernen und entsorgen.

- 7 — ialuril® Prefill so lange wie möglich in der Harnblase belassen (empfohlene Mindestverweilzeit: 30 Minuten).

VERTRIEB — FARCO-PHARMA GmbH

Gereonsmühlengasse 1-11 — D-50670 Cologne, Germany

E-Mail — [info@farco-pharma.de](mailto:info@farco-pharma.de)

Web — [www.farco.de](http://www.farco.de)

ein Produkt von



Caring Innovation



FARCO

# Anleitung Instillation ialuril® Prefill

OHNE  
KATHETER

Bei der Anwendung ohne Katheter mit ialuadapter® sollten folgende Schritte sorgfältig befolgt werden:

1 — Vor Beginn der Behandlung wird der/die Patient(-in) gebeten zu urinieren und dabei dafür zu sorgen, die Harnblase vor der Instillation vollständig zu entleeren.

2 — Die mitgelieferte Kolbenstange auf die Fertigspritze stecken und festschrauben, bis sie perfekt sitzt.



3 — Die Verschlusskappe der Spritze entfernen.



4 — Den ialuadapter® mit einer halben Drehbewegung auf das obere Ende der Fertigspritze montieren, um einen stabilen Halt zu erhalten.

5 — Den gesamten Inhalt der Spritze langsam in die Harnblase instillieren.

6 — Sobald das Produkt in die Harnblase instilliert worden ist, die Spritze vorsichtig entfernen und entsorgen.

7 — ialuril® Prefill so lange wie möglich in der Harnblase belassen (empfohlene Mindestverweilzeit: 30 Minuten).



Eine informative App zum Erlernen der optimalen Anwendung von ialuadapter®

Besuchen Sie [www.ialuapp.com](http://www.ialuapp.com) und geben Sie den Code ialu2020 ein, um Zugriff auf den Inhalt zu erhalten

CODE  
SCANNEN



VERTRIEB — FARCO-PHARMA GmbH

Gereonsmühlengasse 1-11 — D-50670 Cologne, Germany

E-Mail — [info@farco-pharma.de](mailto:info@farco-pharma.de)

Web — [www.farco.de](http://www.farco.de)

ein Produkt von



Caring Innovation



FARCO