

ialuril® Prefill

Warum ialuril® Prefill?

Diese Information ist für Patient:innen, die eine Blaseninstillation mit ialuril® Prefill ärztlich verordnet bekommen haben.


Sie werden mit ialuril® Prefill behandelt, da Sie an einer Blasenenerkrankung leiden, die häufig mit einem der folgenden Symptome einhergeht:



**Häufiges
Wasserlassen**



**Brennender
Schmerz**

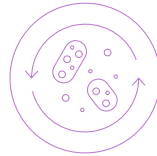


**Wiederkehrende
Harnwegsinfekte**

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, alles in Ruhe durchzulesen, und holen Sie ärztlichen Rat ein, wenn Sie Fragen haben.




Ihnen wurde ialuril® Prefill (ärztlich) verschrieben, um eine oder mehrere der oben genannten Beschwerden zu lindern und weil es sich um eine **sanfte, schmerzfreie Behandlungsform** handelt, die mit Hilfe des ialuadapter® nach ärztlicher Einweisung und Einverständnis von Ihnen selbst zuhause durchgeführt werden kann.

Die Symptome sind darauf zurückzuführen, dass die innere Schicht der Blase (die so genannte GAG-Schicht) geschädigt und nicht mehr in der Lage ist, sie vor den im Urin vorhandenen Bakterien und Abfallstoffen zu schützen.

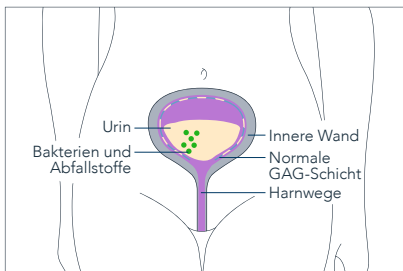

Blase mit normaler GAG-Schicht

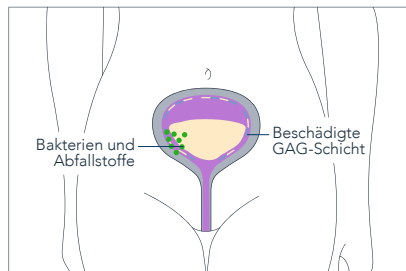

Blase mit beschädigter GAG-Schicht

ialuril® Prefill enthält zwei wichtige Substanzen, **Hyaluronsäure und Chondroitinsulfat**, die die GAG-Schicht ersetzen. Eine regelmäßige Spülung der Blase mit ialuril® Prefill stellt die GAG-Schicht wieder her.

Wann wird ialuril® Prefill angewendet?


ialuril® Prefill wird zur Wiederherstellung der GAG-Schicht angewendet bei:

- 1 — Interstitieller Zystitis (chronische Blasenentzündung ohne offensichtliche bakterielle Ursache). Dies ist auch als Blasenschmerzsyndrom (BPS) bekannt.
- 2 — Wiederkehrenden Harnwegsinfektionen.
- 3 — Blaseninfektionen, die durch die Einnahme von Antitumormitteln verursacht werden.
- 4 — Durch Strahlentherapie verursachten Blaseninfektionen.

Dosierungsschema

Der Inhalt einer Fertigspritze sollte nach folgendem Schema verabreicht werden:

1 vorgefüllte Spritze = 1 Spülung

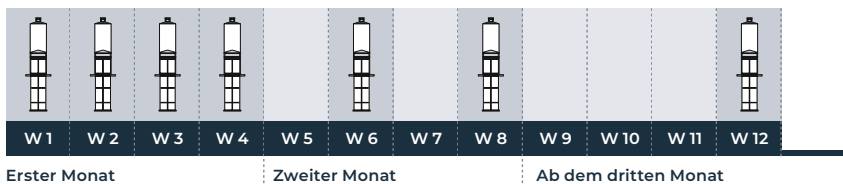

Die ialuril® Prefill Lösung muss jeweils mindestens 30 Minuten lang in der Blase verbleiben, es sei denn, Sie erhalten (vom ärztlichen Personal oder Pflegekräften) andere Anweisungen.

Die Dauer der Behandlung hängt von den Symptomen ab. Sie sollten eine Besserung Ihrer Symptome feststellen können, nachdem Sie 2- bis 4-mal gespült haben, da die Blase dann normal zu funktionieren beginnt. Fahren Sie mit der Behandlung von ialuril® Prefill fort, bis Ihre Blase nach ärztlicher Einschätzung normal funktioniert.

Ihre Kontakte und Termine

NAME _____ NAME _____

TEL. _____ TEL. _____

E-MAIL _____ E-MAIL _____

NAME _____ NAME _____

TEL. _____ TEL. _____

E-MAIL _____ E-MAIL _____

IHR ZEITPLAN

DATUM _____ UHRZEIT _____ DATUM _____ UHRZEIT _____

DATUM _____ UHRZEIT _____ DATUM _____ UHRZEIT _____

DATUM _____ UHRZEIT _____ DATUM _____ UHRZEIT _____

DATUM _____ UHRZEIT _____ DATUM _____ UHRZEIT _____

DATUM _____ UHRZEIT _____ DATUM _____ UHRZEIT _____

DATUM _____ UHRZEIT _____ DATUM _____ UHRZEIT _____

DATUM _____ UHRZEIT _____ DATUM _____ UHRZEIT _____



DATUM _____ UHRZEIT _____ DATUM _____ UHRZEIT _____

Wie wird ialuril® Prefill angewendet?


Die Behandlung wird in der Klinik von ärztlichem Personal oder einer Pflegekraft durchgeführt. Nach der notwendigen Einweisung und nach ärztlichem Einverständnis können Sie die Behandlung auch selbst zuhause durchführen.

ialuril® Prefill kann auf zwei Arten verabreicht werden – entweder über einen Katheter oder mit dem ialuadapter®, der der Packung kostenlos beiliegt.


Anwendung mit ialuadapter®

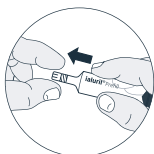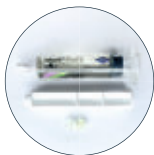


- 1 — Vor Beginn der Behandlung lassen Sie so viel Urin ab wie möglich. Die Harnblase sollte vor der Instillation möglichst vollständig entleert sein.
- 2 — Waschen Sie sehr gründlich Ihre Hände.
- 3 — Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie
 - Spritze,
 - Kolbenstange und
 - ialuadapter®.
- 4 — Stecken Sie die Kolbenstange auf die Fertigspritze. Drehen Sie die Kolbenstange fest, bis sie sicher sitzt.
- 5 — Entfernen Sie die Verschlusskappe der Spritze.

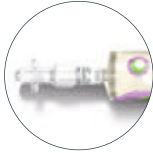

6 — Nehmen Sie den ialuadapter® zur Hand und drehen Sie diesen mit einer halben Drehbewegung auf das obere Ende der Fertigspritze.

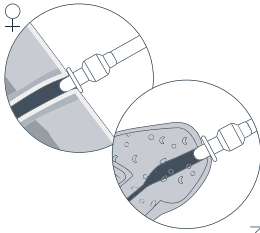

7 — Führen Sie den ialuadapter® sanft in den vorderen Teil der Harnröhre ein (7 mm) und drücken Sie ihn leicht an. Ein Kragen sorgt dafür, dass der Adapter nicht zu weit in die Harnwege eingeführt werden kann.

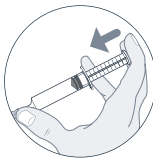

8 — Drücken Sie nun langsam das ialuril® Prefill aus der Spritze in die Blase. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit aus der Harnröhre ausläuft. *Instillieren Sie den Inhalt der Fertigspritze in die Blase, indem Sie den Kolben der Spritze herunterdrücken. Entfernen Sie die Fertigspritze zusammen mit dem Katheter zwecks Entsorgung.*

9 — Wenn die Spritze leer ist, entfernen Sie diese vorsichtig mit dem ialuadapter®.

Lassen Sie ialuril® Prefill so lange wie möglich in der Blase (empfohlene Mindestdauer: 30 Minuten).

ialuril® Prefill

ialuril® Prefill können Sie in Ihrer Apotheke oder direkt bei FARCO bestellen.

PZN 18330330

GRÖSSE 1 x 50 ml

ARTIKEL-NR. 9901674


STAND: 05/2023



inkl. ialuadapter®



ZUM BESTELL-
FORMULAR

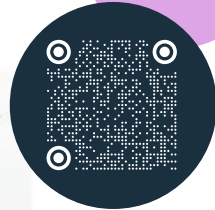

Weitere Informationen finden Sie auf www.ialuril.de

Bei Fragen sind wir gerne auch
persönlich für Sie da. Sie erreichen
uns unter:

E-Mail — info@farco-pharma.de

Tel. — 0221-594061

Mo.–Do. 08:00–16:30 Uhr
Fr. Bis 15:00 Uhr

VERTRIEB — FARCO-PHARMA GmbH
Gereonsmühlengasse 1–11 — 50670 Köln
E-Mail — info@farco-pharma.de
Web — www.farco.de



FARCO